

TASCHEN BEATMUNGSMASKE CPR POCKET MASK, WEISS

Anwendung nur durch geschultes Personal.

Anwender müssen die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen. Die Beatmungsmaske ist nur von geschultem Personal in Standardsituationen anzuwenden. Für Anwendungsfehler haften wir nicht. Die Beatmungsmaske stellt eine physikalische Barriere zwischen Patient und Ersthelfer dar.

Komponenten

- BEATMUNGSMASKE
- Einwegventil
- O2 Anschluss
- Aufbewahrungsbox

Temperaturbedingungen

Ideale Bedingungen für Benutzung, Aufbewahrung und Transport:

Benutzungs-Temperatur -10 bis +42 °C

Lager-Transport-Temperatur -35 bis +50 °C

Wartung

Die Beatmungsmaske soll in periodischen Zeitabständen überprüft werden. Bewahren Sie die Maske in der Box an einem kühlen, belüfteten Ort auf. Starke Sonneneinstrahlung kann die Box und die Beatmungsmaske beschädigen. Überprüfen Sie die Beatmungsmaske vor jeder Anwendung auf Funktionalität. Wenn die Box oder die Beatmungsmaske beschädigt ist, kann sie nicht mehr eingesetzt werden. Tauschen Sie die Beatmungsmaske.

Anwendungsbereich

Die Beatmungsmaske wurde speziell entwickelt für die Anwendung zur Mund zu Mund Beatmung durch den professionellen Ersthelfer. Sie bietet höchsten Schutz sowohl für den Helfer und den Patienten. Ein Einwegventil mit niedrigem Durchlasswiderstand und ein hydrophober Einmal-Bakterienfilter verhindern das Durchdringen von Flüssigkeiten und Sekreten. Die Beatmungsmaske soll nur durch geschultes Personal eingesetzt werden.

Warnhinweise

Anwender müssen die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen. Die Beatmungsmaske ist sorgfältig aufzubewahren. Beschädigungen die bei der Benutzung entstehen unterliegen nicht der Garantie. Die Beatmungsmaske darf nicht thermischen Einflüssen sowie Feuer ausgesetzt werden. Überprüfen Sie ob alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden um die Übertragung von Blut und Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Wenn Sie keine Beatmungsmaske zur Verfügung haben, beginnen Sie unverzüglich mit der Mund zu Mund Beatmung.

Warnhinweise

Überprüfen Sie die Beatmungsmaske vor jeder Anwendung. Die Wiederbenutzung bei zu beatmenden Patienten ist nicht zulässig.

Vor der Benutzung beachten Sie bitte folgendes:

- weist die Maske Beschädigungen auf?
- hat die Maske vollständigen Patientenkontakt?
- ist das Ventil sauber
- ist der O2 Anschluss geschlossen?
-

Vor Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ausgepackt sind. Seien Sie vorsichtig im Umgang um Beschädigungen zu vermeiden. Beschädigungen die bei der Benutzung entstehen unterliegen nicht der Gewährleistung.

Anwendung

Anwendung bei Erwachsenen und Kindern.

- prüfen Sie den Filter und verbinden Sie diesen mit der BEATMUNGSMASKE
- reinigen Sie die Atemwege ggf. von Fremdkörpern
- positionieren Sie sich hinter dem Kopf des Patienten
- setzen Sie die Beatmungsmaske über Mund und Nase des Patienten
- blasen sie zweimal in die Beatmungsmaske und beobachten, ob sich der Brustkorb hebt
- benutzen Sie Ihre Ellenbogen um den Kopf zu überstecken

Eine effiziente Beatmung erreichen Sie bei Erwachsenen mit ca. 12 Beatmungen pro Minute, dieser Wert kann je nach Situation abweichen. Wenn der Patient erbricht, reinigen Sie die Atemwege und die Beatmungsmaske. Überprüfen Sie die korrekte Funktion und nehmen Sie die Beatmung danach unverzüglich wieder auf.

Reinigung

Achten Sie auf eine sorgfältige Reinigung der Maske um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Das Ventil und der Filter sind nur zu einmaligen Gebrauch geeignet. Die BEATMUNGSMASKE (ohne Filter und Ventil) ist wieder verwendbar und einfach zu reinigen. Reinigen Sie die Maske mit warmer Seifenlauge.

Weichen Sie die Maske für 15 Minuten in einer Lauge aus Natrium Hydrochlorid im Mischungsverhältnis 1: 70 ein.

Die Bedienungsanleitung muss mit dem Produkt aufbewahrt werden.

ETZEL Behördenausstatter; Tafingerstraße 10; 71665 Vaihingen/Enz; info@etzel-shop.de; www.etzel-shop.de



0123